

INSTRUCCIONES DE USO

MODELO: 388H / LICUASTOP

- **Descripción General:**


Bata, para Quirófano, Reutilizable.

Certificada conforme con la normativa EN 13795, para 75 ciclos de lavado y esterilizado, lo que la hace apta para la prevención de infecciones en el quirófano.

Fabricada con tejido de poliéster (99 %) y fibra de carbono (1 %).

- **Colocación Prenda:**

Introducir primero los brazos, después, cerrar el centro de la espalda, mediante automáticos en el cuello y cintas blancas en la cintura. A continuación, sobreponer el delantero ajustándolo mediante 2 cintas: una verde cosida en el lado derecho y otra verde, cosida en el lado contrario, que el ayudante entrega al cirujano sujetándola con unas pinzas estériles.

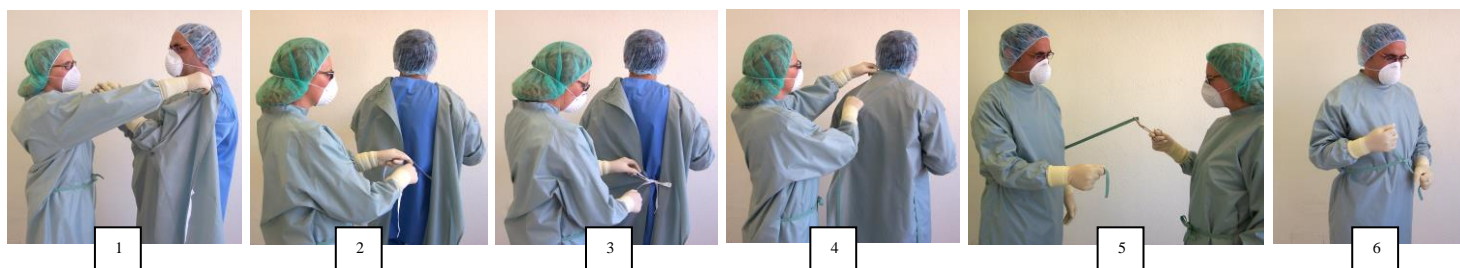

- **Instrucciones de Reutilización:**

Previamente a su utilización hay que lavar y esterilizar la prenda, para ello se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

Programa de lavado:

OPERACION	TIEMPO	NIVEL DE AGUA	TEMPERATURA DEL AGUA	AÑADIR POR CADA 50 KG.
PRELAVADO	3 MIN.	ALTO	FRIA	
PRELAVADO	3 MIN.	ALTO	FRIA	
PARA	10 MIN.	BAJO	60°	225 G. DE DETERGENTE NO IONICO 225 G. DE ALCALI PH(MAX)=10.0
ACLARADO	3 MIN.	ALTO	60°	
VACIADO	3 MIN.	ALTO		
ACLARADO	2 MIN.	ALTO	50°	
ACLARADO	2 MIN.	ALTO	40°	
ACLARADO	2 MIN.	ALTO	FRIA	
NEUTRALIZADO	5 MIN.	BAJO	FRIA	AÑADIR NEUTRALIZANTE HASTA PH=6.0
VACIADO	5 MIN.			

- 1) Precaución: El PH no debe ser superior a 10.0.
- 2) Si se usara un blanqueador clorado, debe de utilizarse un anticloro en el 2º aclarado.
- 3) Asegurarse siempre que no quedan restos de cloro en las prendas después de los lavados.
- 4) No sobrecargar las lavadoras, ni las secadoras.
- 5) El tejido debe secarse cuidadosamente en una secadora con aire filtrado. La temperatura de secado no debe ser superior a los 80°.
- 6) Inspeccionar regularmente secadoras y lavadoras para asegurarse que no hay salientes que puedan dañar los tejidos.
- 7) La sala de empaquetado y doblado debe estar siempre limpia. El suelo se considera zona sucia, si la prenda cae al suelo se deberá volver a lavar.

Programa de esterilizado:

Autoclave de Vapor a 121° C durante 20 minutos.

- **Almacenaje del producto:**

Almacenar en lugar limpio, fresco y seco.

Proteger de la luz directa del sol y de fuentes de calor.